



NOTICE D'UTILISATION - APPLICATION KEYDE -

Vous venez de recevoir un équipement en connexion Bluetooth et l'équipe Annad vous remercie de votre confiance !
Voici la notice de connexion et d'utilisation de l'application Keyde.



Trouver et connecter le moteur

1

Faites tourner la pédale ou la roue afin de réveiller votre moteur électrique. Dans les paramètres Bluetooth de votre téléphone vous devriez voir apparaître l'appareil " BLE_MOTOR", mais vous ne devez pas connecter votre téléphone et cet appareil depuis le paramétrage Bluetooth de votre téléphone.

2

Ouvrez l'application Keyde. Vérifiez que vous avez bien autorisé l'utilisation du Bluetooth par l'application Keyde.

3


Cliquez sur le bouton de recherche. Lorsque l'application aura trouvé votre appareil elle s'y connectera normalement automatiquement.





Paramètres

1


Pour une première utilisation, affichez la page des paramètres en appuyant sur le bouton  sur la gauche du moteur.

2

Rentrez les paramètres de roue : circonférence, diamètre, etc.

3

Les paramètres tels que “puissance du moteur” et “vitesse maximale” sont localisés dans les paramètres avancés. L'accès est protégé par un mot de passe : “1919” .

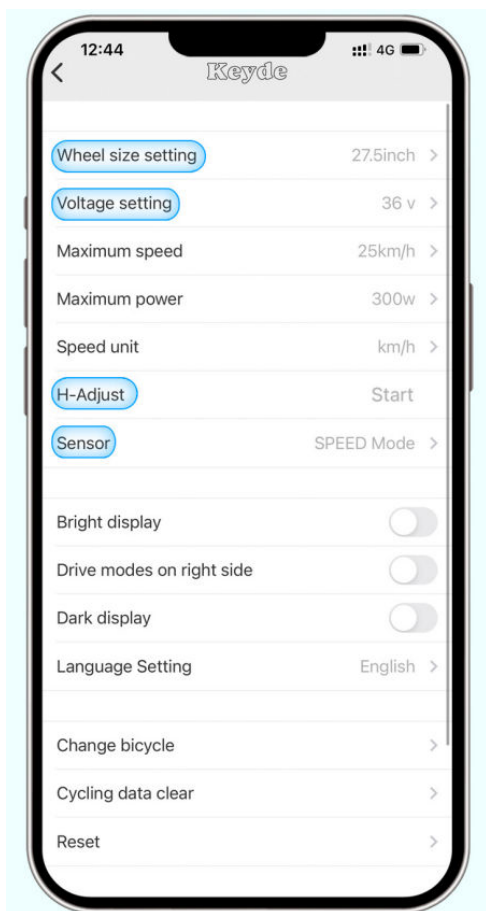

Remarques :

- 1- vous disposez également d'une option permettant d'exporter les données de votre trajet.
- 2- Les paramètres ne peuvent être changer que si vous respectez un état stationnaire (vitesse =0)





Schéma de la page d'accueil

